



Version Q/R

S'assurer que la console Advantage Windows est allumée

Pousser les images de la console du scanner vers Advantage Windows

Cliquer sur

Cliquer sur

Choisir **CHRA_PC0**

Choisir

Dans la liste choisir l'examen à transférer

Cliquer sur

Pousser les images de Advantage Windows vers le Pacs

Sélectionner l'examen à transférer dans la liste "Examinations"

Cliquer dans la barre des menus sur **NETWORK**

Cliquer sur **Select Remote Host**

Cliquer sur **XPLOREPACS**

Cliquer sur


Cliquer dans la barre de menus sur **NETWORK**

Cliquer sur **Push examination**

Cliquer sur


Tirer les images du Pacs vers le PC

Lancer le programme *e Film*

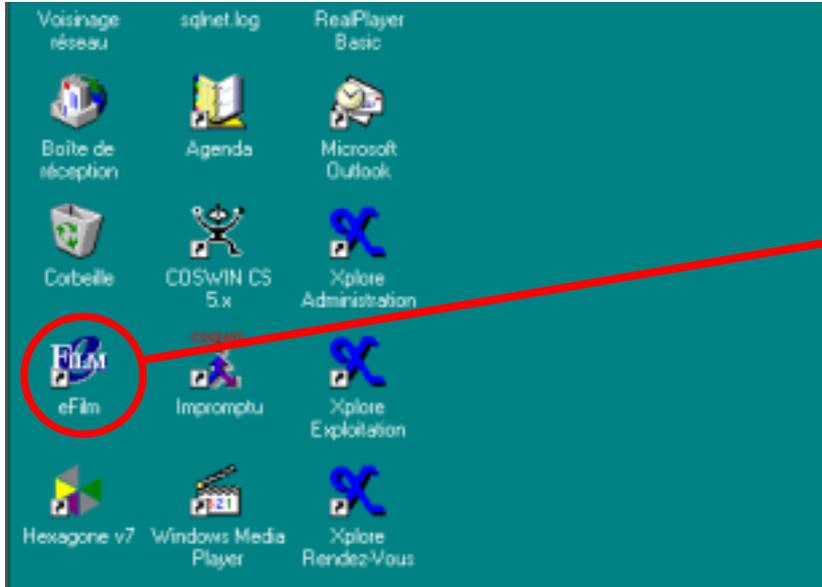

par un **double** clic sur cette icone

Chercher les images à rapatrier

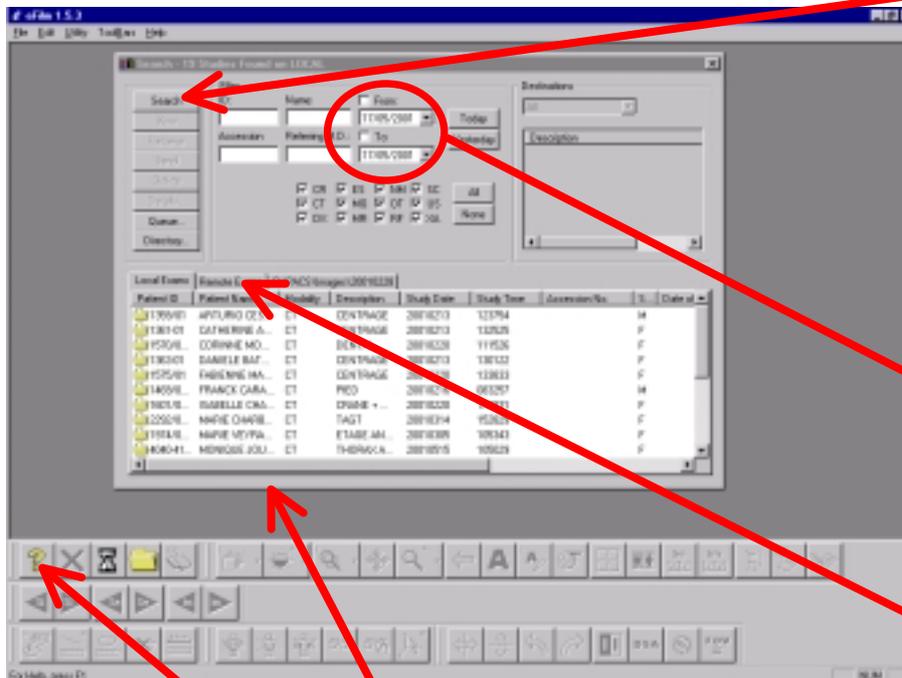


Faire un **simple** clic sur " Search " ③

Eventuellement cocher "From" et "To" pour faire une recherche sur une période précise ②


Faire un **simple** clic sur " Remote exams " ①

Si cette fenêtre n'est pas ouverte


Faire un simple clic sur ce bouton

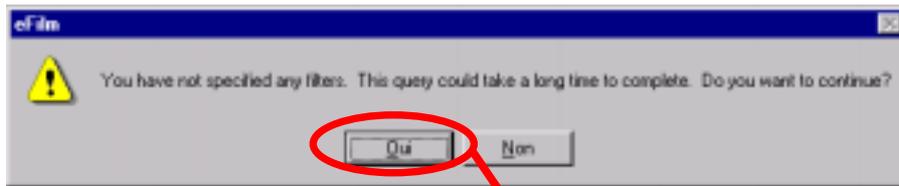


Si cette fenêtre apparaît, faire un **simple** clic sur "Oui"

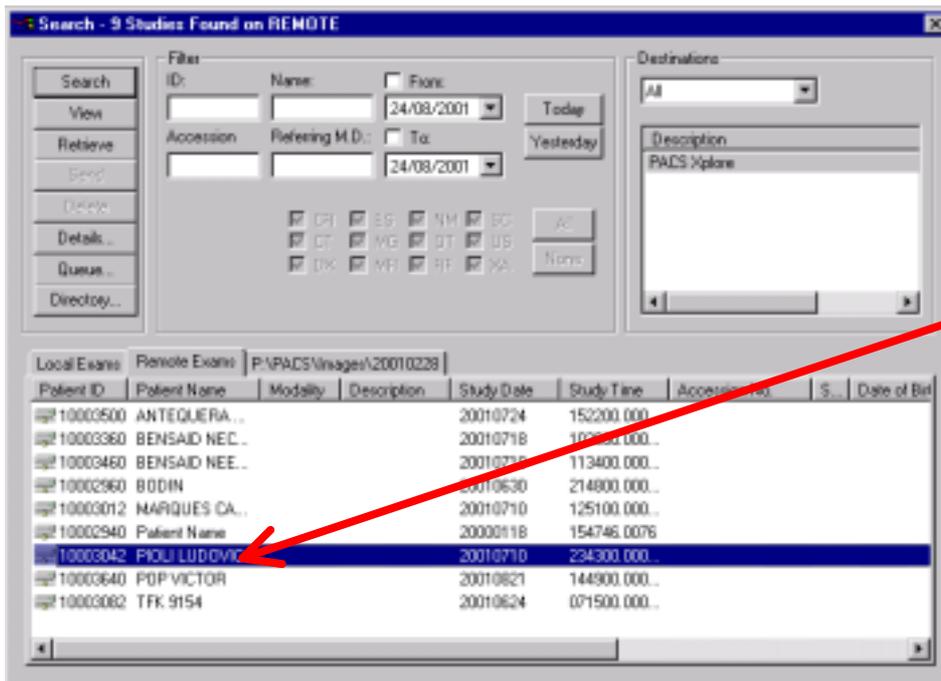


Sélectionner l'examen recherché en faisant un **double** clic sur la ligne

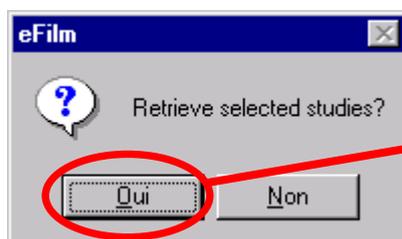

Faire un **simple** clic sur "Oui"

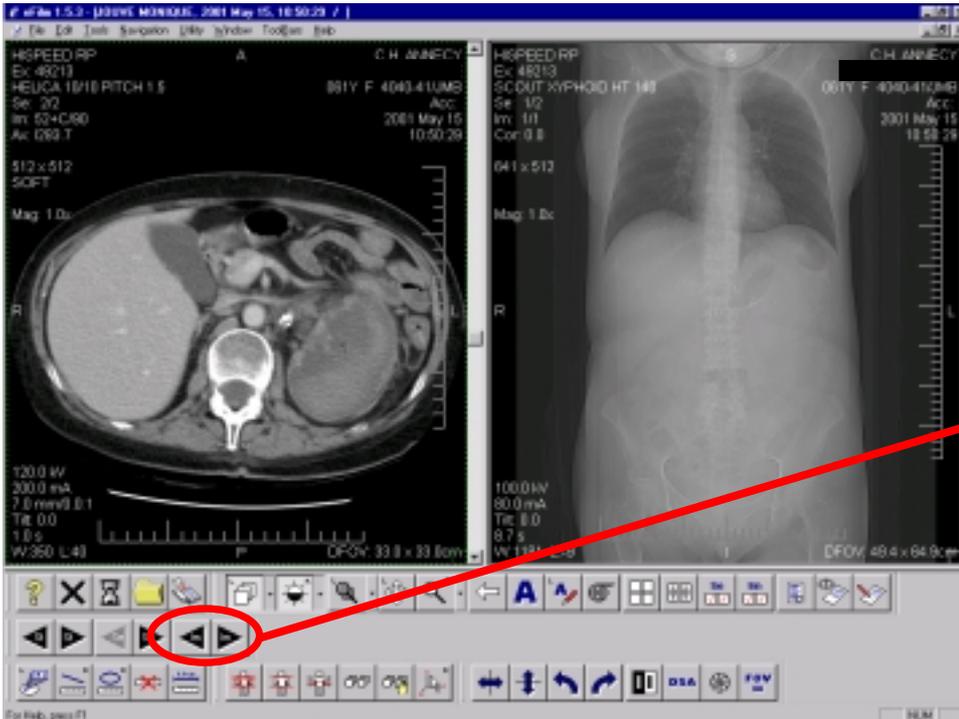


Utiliser ces boutons pour passer à l'image suivante ou à l'image précédente

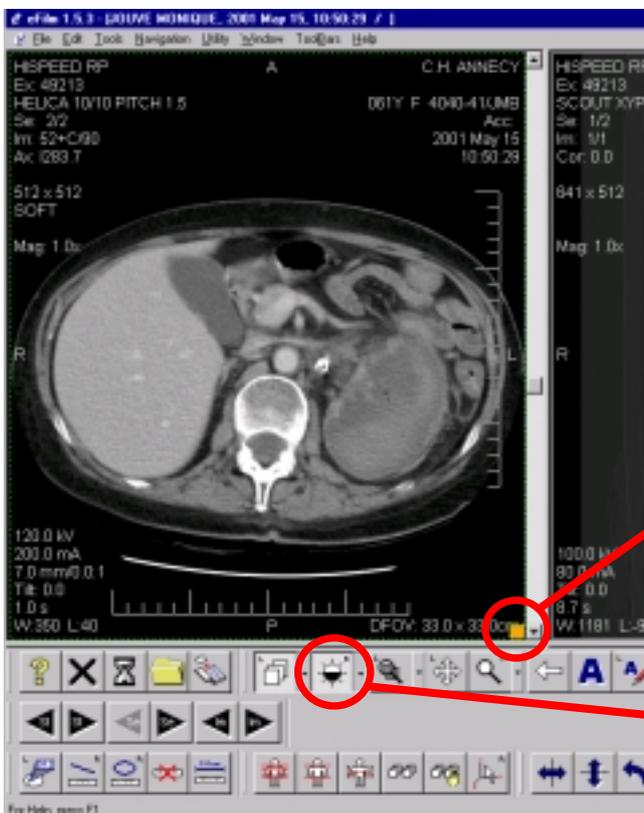

Pour sélectionner une image à transférer :


Faire un simple clic dans le petit carré pour le remplir

Utiliser ce bouton pour régler le fenêtrage

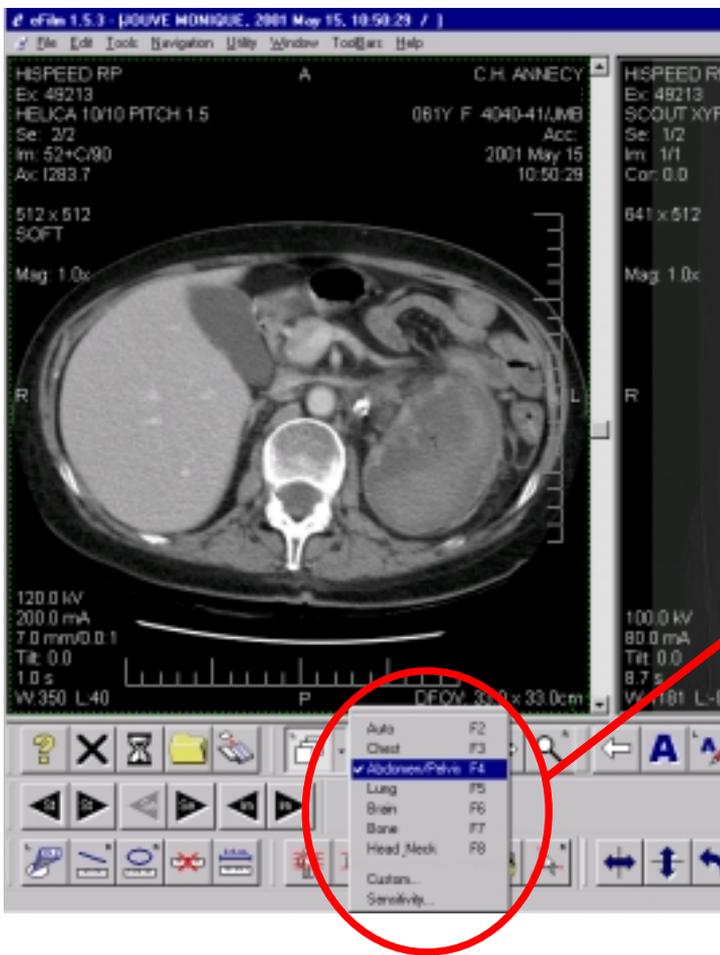


Choisir dans la liste

Quand toutes les images que l'on veut exporter sont fenêtrées et marquées

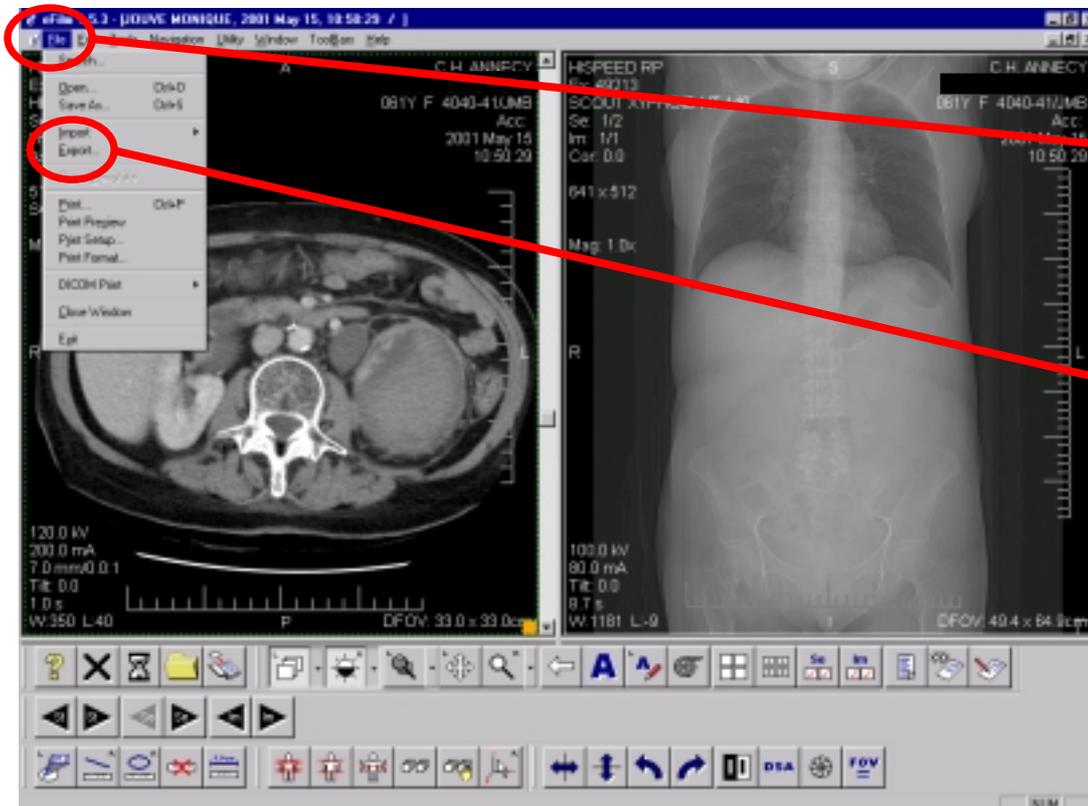

Faire un simple clic sur **File**

Faire un simple clic sur **Export ...**

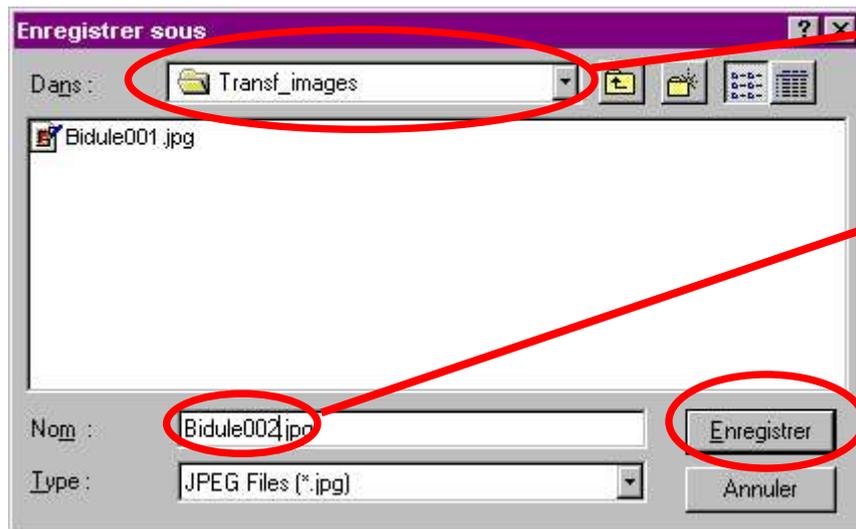

Choisir
l'emplacement où
vous voulez
stocker les images
(Répertoire
« Transf_images »)


1

Donner un nom
aux images

2

Faire un **simple**
clic sur
Enregistrer

3

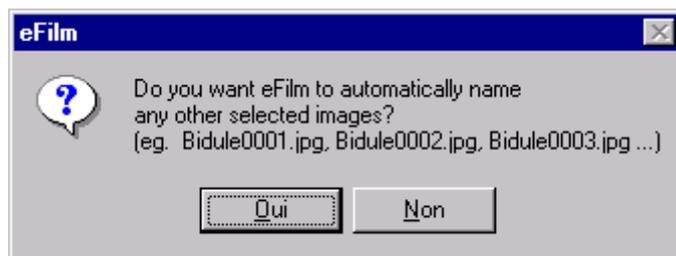

Si vous exportez plusieurs images
d'un coup, vous verrez apparaître
cette fenêtre.

Répondre **Oui**

Adresses électroniques des correspondants potentiels :

Services de Neurochirurgie

**Grenoble, Hôpital
Michallon**

**Genève, Hôpital
Cantonal**

**Lyon, Hôpital Pierre
Wertheimer**

**Annecy, Clinique
d'Argonay**

NA : numéro abrégé

Adresses e-mail

[gardeneurochir@chu-
grenoble.fr](mailto:gardeneurochir@chu-grenoble.fr)

garde.neurochir@hcuge.ch

frederic.dailler@chu-lyon.fr

[christophe.lapras@libertysur
f.fr](mailto:christophe.lapras@libertysur
f.fr)
dr.bf@netsource.fr

Numéros de téléphone

Tél : 04 76 76 87 89

Fax : 04 76 76 87 77

Tél : 00 41 12 23 72 33 11

Fax : 00 41 12 23 72 67 44

(Médecin trieur
traumatologie)

04 72 35 71 85 (U800)

04 50 09 74 00(NA : 8121)